

## レークビュー貸切風呂『入浴介助リフト』ご利用方法

- ①お身体を洗った後、シャワーキャリーをリフトに横付けし、ご移乗ください。  
※リフトのひじ掛けは下に下ろすことが可能です。※奥まで腰を下ろしてください。



- ②リフトの昇降（上下）はレバーで操作可能です。  
左右（横軸）の移動は手動で行ってください。（背もたれ付近を手で押してください。）



- ③お風呂の縁を乗り越える際、足を曲げ、乗り越えて頂く必要があります。  
ご自身で足を動かすことが難しい場合、お連れ様にて補助をお願いいたします。



④レバーを操作し、リフトを下ろしてご入浴ください。

※安全ため、おおよそ湯舟の水面が胸のあたりにくる位置でリフトは停止いたします。

※冬場等、肩が冷える場合は必要に応じて桶を使い、かけ湯を行ってください。



⑤リフト浴が難しいお客様向けに洗体用にマットを用意しております。

※そのほか、滑り止めマットなどの用意もございます。

